

Enn meira öryggi tryggt

! VIÐVÖRUN

HENGINARHÆTTA

Börn hafa HENGT SIG í snúrum. Notaðu skynjarplötuna ALDREI án



öryggisfestinganna. Athugaðu öryggisfestingarnar fyrir hverja notkun til að tryggja að þær séu festar örugglega undir barnarúminu. Hættu notkun á skynjarplötunni ef öryggisfestingarnar eru skemmdar eða brotnar. Þessi vara er ekki leikfang. Leyfðu börnum aldrei að leika með hana.


Hengingarhætta

Snúran sem kemur úr skynjarplötunni sem sett er undir dýnu barnarúmsins, gæti valdið hengingarhættu ef barn nær taki á snúrunni og dregur hana í rúmið og færir hana utan um hálsinn.

Til að draga úr hengingarhættu hefur Angelcare Monitor látið útbúa öryggisfestingar sem settar eru yfir snúruna sem kemur úr skynjarplötunni og tengist móðurstöðinni.

Með öryggisfestingunum er Angelcare Monitor að leggja sitt af mörkum til að minnka áhættu á hengingarhættu.

Öryggisfestinguna skal nota á tæki AC1100 og AC401 þar sem þau innihéldu hana ekki í kassanum fyrir árið 2014. Hægt er að sjá tegund tækisins aftan á móðurtækinu.

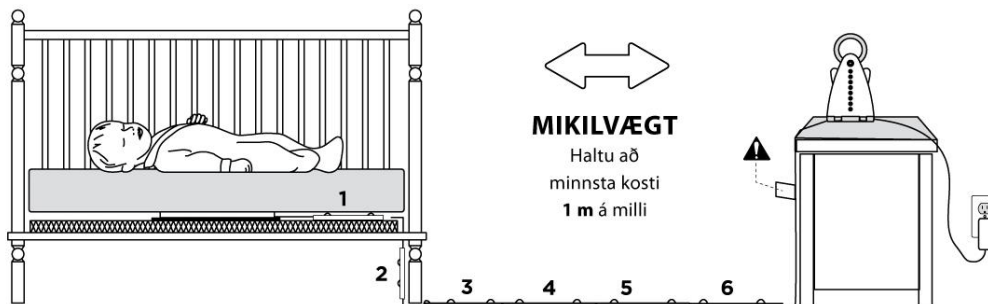

Hægt er að fá öryggisfestingu utan um snúruna á Angelcare tækið í afgreiðslu söluaðila